



NEW



SOOO ARTISTIEK

MET **VISALYS® FILL** & **VISALYS® FLOW**

UNIVERSEEL NANO-HYBRIDE VULCOMPOSIT


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

VISALYS® FILL & VISALYS® FLOW

Lichtuithardend Universeel Nano-Hybride vulcomposiet in twee consistenties

VOOR ELKE TOEPASSING

- Voor alle vullingen van klasse I tot VI
- Voor vervaardiging van stompopbouw en reparatie van defecte vullingen
- Voor esthetische vormgeving
- Kan gebruikt worden met elke standaard lichtuithardende bonding

FLEX SHADE SYSTEM VOOR EENVOUDIGE KLEURBEPALING

- Kies de juiste kleur met behulp van het Flex Shade System
- Harmonie en eenvoud dankzij het kameleoneffect voor **alle 16 VITA™ - Classic kleuren** in het anterieure en posterieure gebied, **met slechts vijf kleuren**

COMFORTABELE WERKWIJZE

- Hecht niet aan het instrument en eenvoudig te modelleren (Visalys® Fill)
- Perfecte balans tussen vloeibaarheid en stabiliteit (Visalys® Flow)

UITSTEKENDE MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

- Hoog vulstofgehalte: 87% (Visalys® Fill) or 80% (Visalys® Flow)
- Uitstekende buigsterkte:
147 MPa (Visalys® Fill) or 112 MPa (Visalys® Flow)

DUURZAAM VULCOMPOSITIE MATERIAAL

- Minimale verkleuring door minimale waterabsorptie
- Geringe slijtage dankzij geavanceerde vulstoftechnologie voor duurzame vullingen



EENVOUDIGE KLEURAFSTEMMING DANKZIJ HET **FLEX SHADE SYSTEM**



Het **FLEX SHADE SYSTEM** maakt efficiënt en duurzaam werken mogelijk met slechts 7 **KLEUREN** voor esthetische restauraties.

Hier vindt u de hoofdkleuren van Visalys® Fill & Visalys® Flow met de optimale verwijzing naar de Vita-kleuren.¹⁾



PRODUCT KLEUREN

A1

LIGHT BRIGHT

A2

BRIGHT

A3

MEDIUM BRIGHT

A3.5

MEDIUM DARK


A4

DARK

VITA-TANDEN (incl. vulling gemaakt van Visalys® Fill kleuren)¹⁾



A1

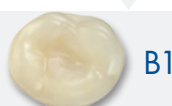

B1



C1



A2



B2




D2



A3



B3

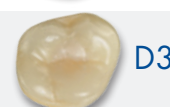

D3



D4




A3.5



C2



C3

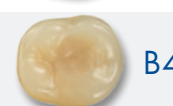

B4



A4



C4

Bij bijzonder lichte tandkleuren gebruikt u de kleur **BL**²⁾

PRODUCT KLEUR

BL

WHITE

VITA-TANDEN (incl. vulling gemaakt van Visalys® kleur BL)²⁾



OM1



OM2



OM3




Voor verkleurde caviteiten gewoon maskeren met **OA2**

PRODUCT KLEUR

OA2

OPAQUE

VITA-TANDEN (incl. vulling gemaakt van Visalys® Fill kleuren)¹⁾

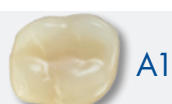

A1



A4

Laag 1: gevuld met Visalys® Fill Kleur **OA2**
Laag 2: gevuld met Visalys® Fill Kleur **A1**

Laag 1: gevuld met Visalys® Fill Kleur **OA2**
Laag 2: gevuld met Visalys® Fill Kleur **A4**




¹⁾ Klas 1 vullingen in kunststof elementen, als voorbeeld met Visalys® Fill, om de consistentie van het Flex Shade System te demonstreren.


²⁾ Klas 4 vullingen in kunststof elementen, als voorbeeld met Visalys® Fill, om de consistentie van het Flex Shade System te demonstreren.

VISALYS® FILL & VISALYS® FLOW – DUURZAME STABILITEIT

VISALYS® FILL Buigsterkte voor en na thermische wisselbelasting³⁾

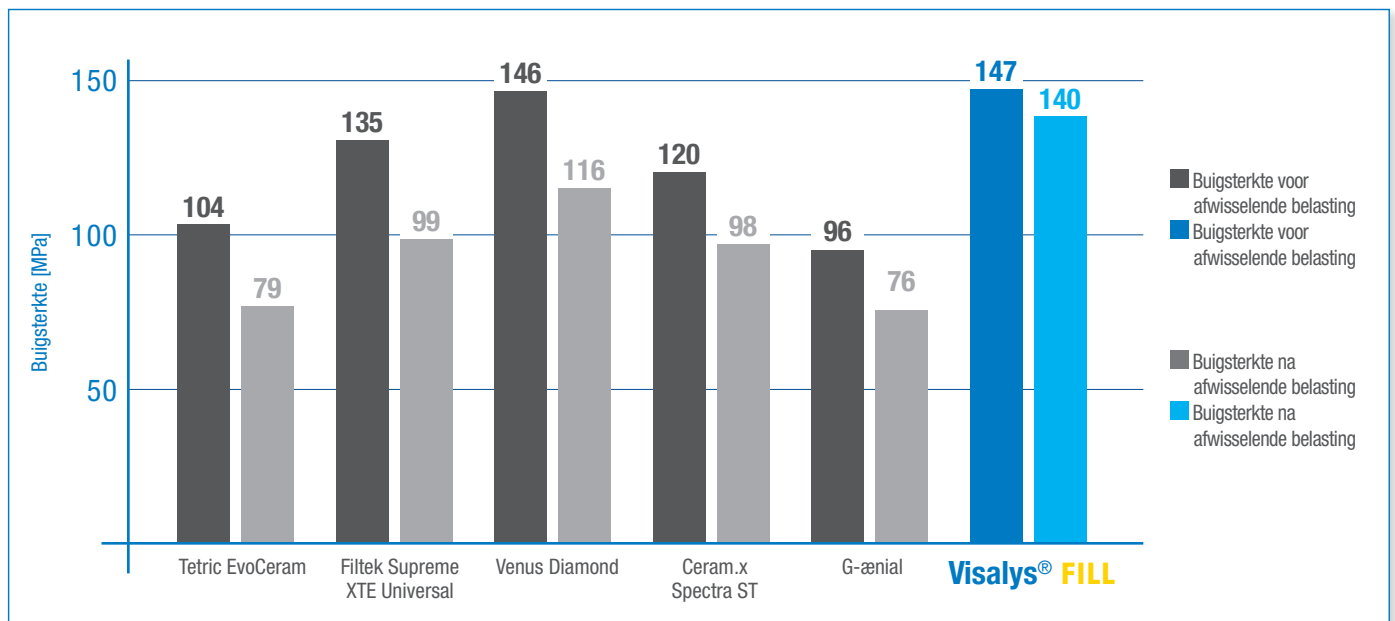

VISALYS® FLOW Buigsterkte voor en na thermische wisselbelasting³⁾

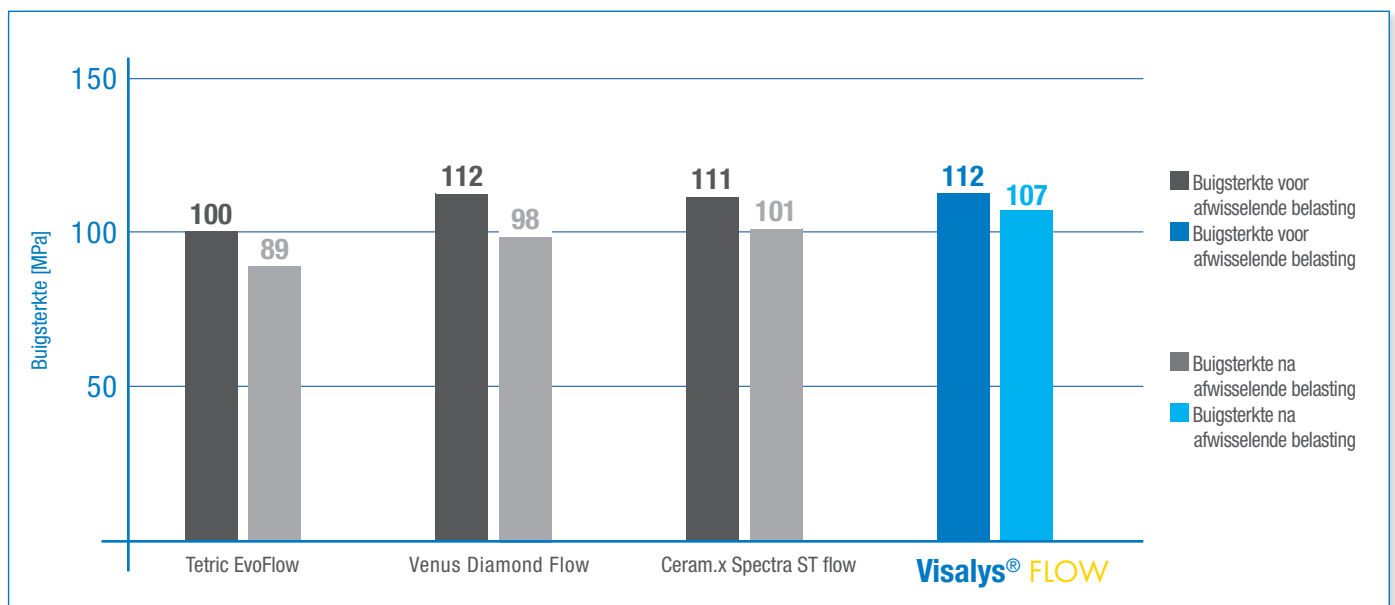


UITSTEKENDE BUIGSTERKTE OOK ONDER STRESS


- De getoonde thermische meting komt overeen tot maximaal 12 maanden belasting in de mond. (5000 cycli bij 5°C en 55°C)
- De waarden vertegenwoordigen de duurzame stabiliteit onder in-vivo omstandigheden

MEER GLAS DAN PLASTIC

VISALYS® FILL Anorganisch percentage in de composiet⁴⁾

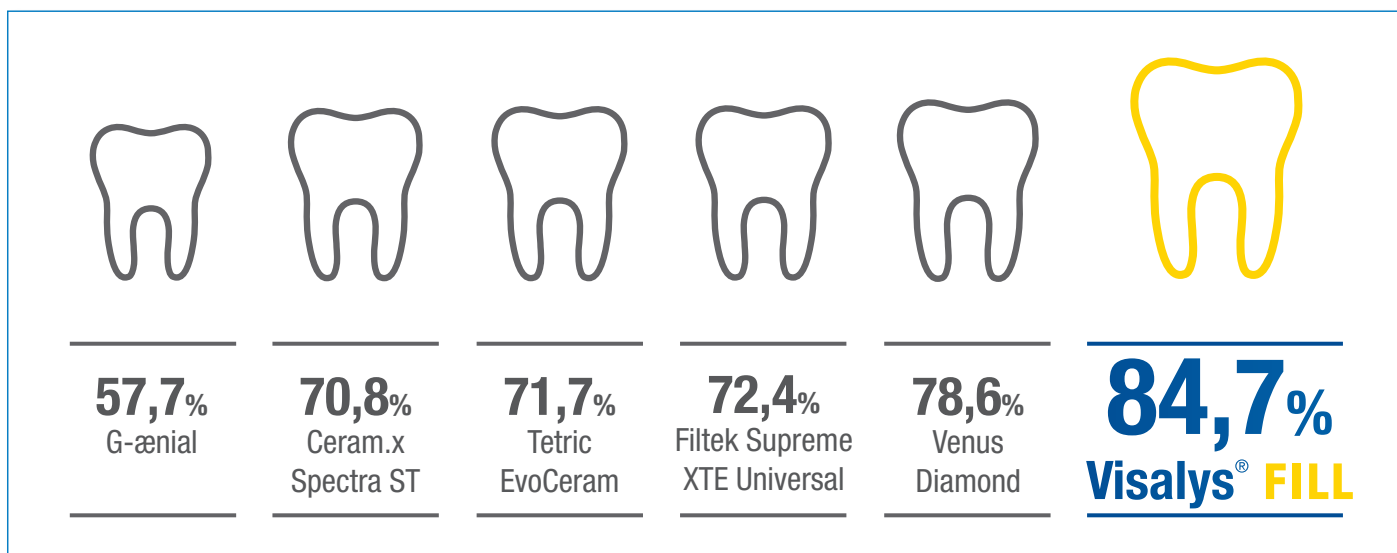

VISALYS® FLOW Anorganisch percentage in de composiet⁴⁾

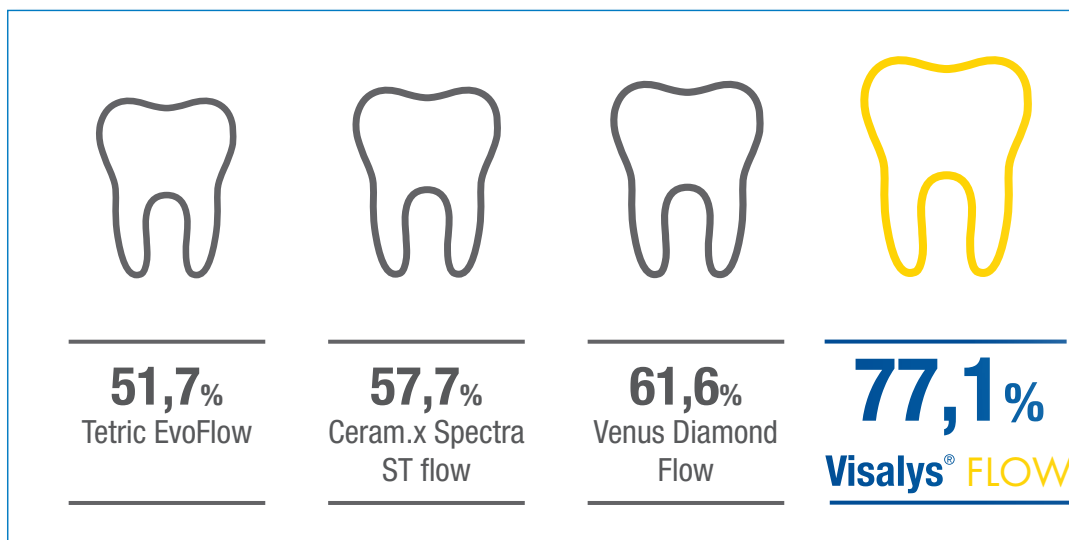


ZEER HOOG GEHALTE ANORGANISCHE VULSTOFFEN

- Voor een goede en duurzame stabiliteit
- Voor uitstekende compatibiliteit door hoge biocompatibiliteit


DUURZAME KLEURSTABILITEIT

VISALYS® FILL Waterabsorptie⁵⁾

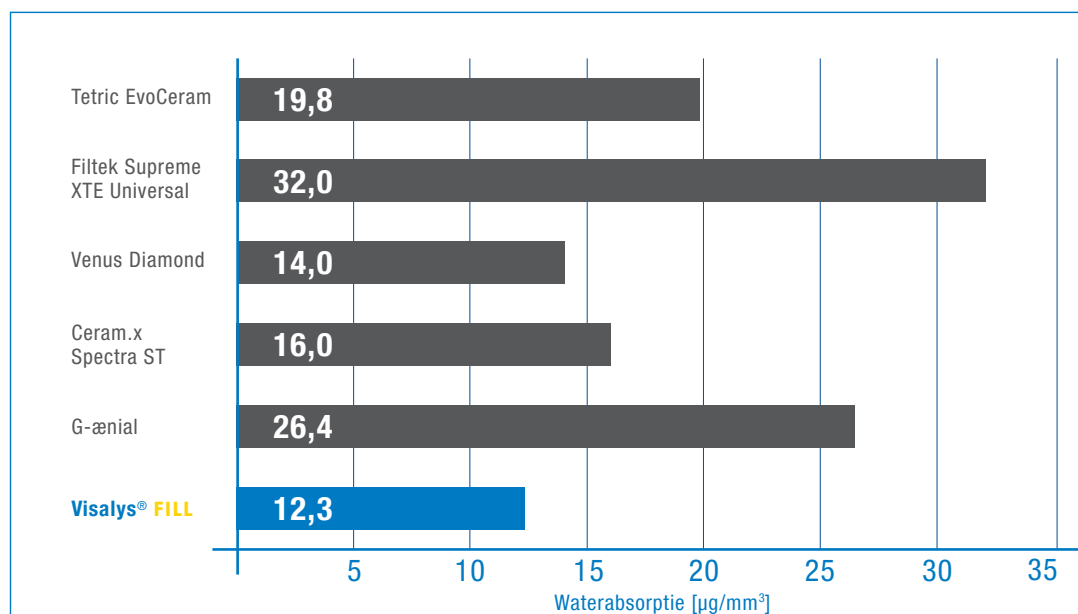

H ₂ O ⁶⁾	Koffie ⁶⁾	Wijn ⁶⁾

VISALYS® FLOW Waterabsorptie⁵⁾

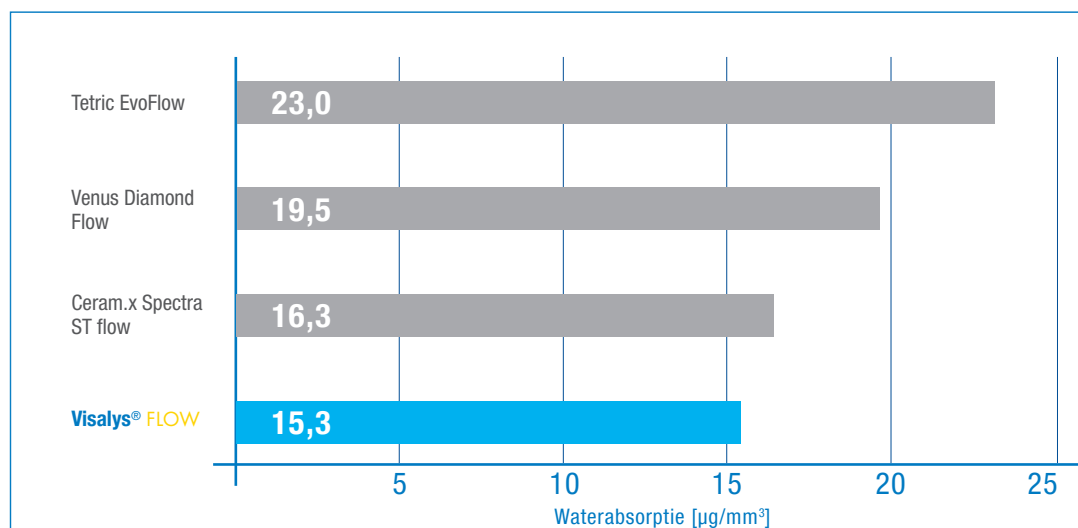

H ₂ O ⁶⁾	Koffie ⁶⁾	Wijn ⁶⁾



LAGE WATERABSORPTIE


- Voorkomt verkleuring van vullingen
- Voor duurzame esthetiek

LAGE KRIMP

VISALYS® FILL volumekrimp⁷⁾



VISALYS® FLOW volumekrimp⁷⁾

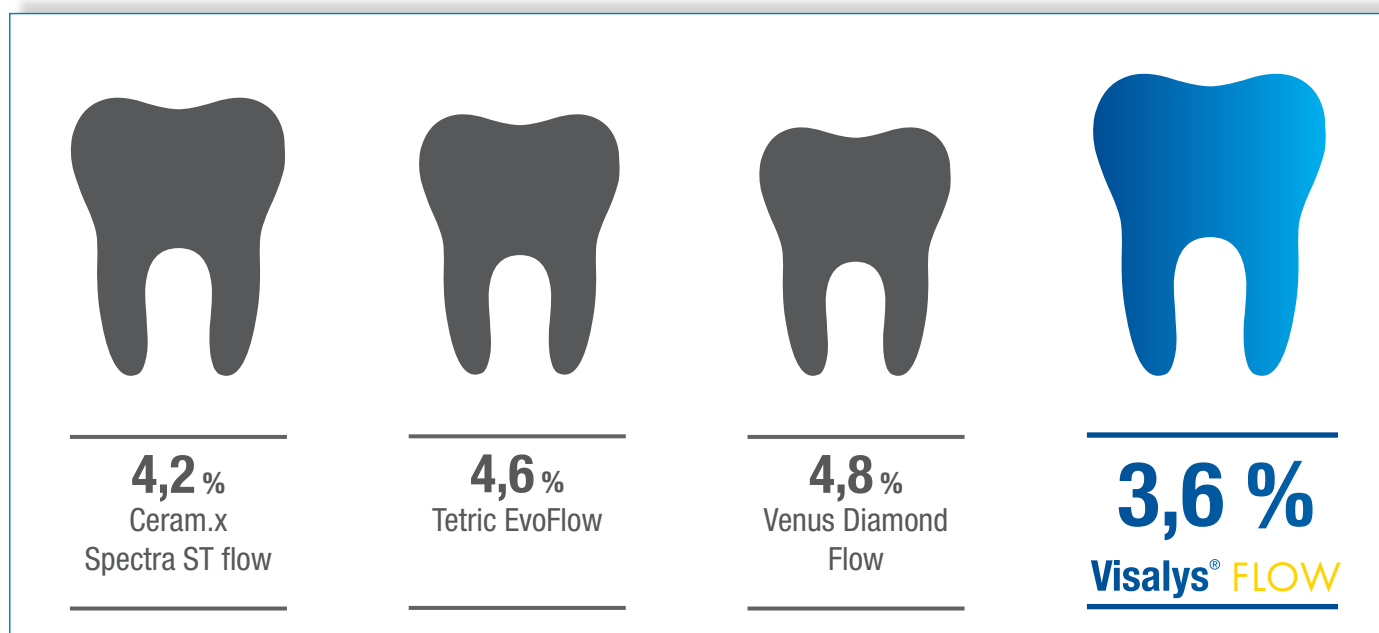

LAGE KRIMP

- Voor langdurige restauraties
- Voor mechanische retentie van het vulmateriaal in de tandholte
- Vermindert het risico van marginale “gaps” en secundaire cariës

HET SORTIMENT



Visalys® Fill & Visalys® Flow

Visalys® Fill

1 x 4 g Syringe



A1	REF 1500299
A2	REF 1500399
A3	REF 1500499
A3.5	REF 1500599
A4	REF 1500699
Opaque A2	REF 1500799
Bleach	REF 1500899



Visalys® Fill

15 x 0,25 g Caps



A1	REF 1501299
A2	REF 1501399
A3	REF 1501499
A3.5	REF 1501599
A4	REF 1501699
Opaque A2	REF 1501799
Bleach	REF 1501899



Visalys® Flow

1 x 1,8 g Syringe
5 x application tips



A1	REF 1503099
A2	REF 1503199
A3	REF 1503299
A3.5	REF 1503399
A4	REF 1503499
Opaque A2	REF 1503599
Bleach	REF 1503699



Accessoires

100 x application tips
voor Visalys® Flow



REF 1505099



Made
in
Germany

NOTITIES

Voor meer informatie vraag uw
dental depot of direct via ons:

Kettenbach Dental Benelux
Takkebijsters 73A
4817 BL Breda
info@dental4.nl
www.dental4.nl



0510727_1424

KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent